

Die richtige Verwendung des Implantats



1. Patientenhandbuch für die Produktreihe AMS 700™ mit MS Pump™. Informationen und Anweisungen für Patienten, die über ein auffällbares Schwellkörperimplantat nachdenken. American Medical Systems, Inc. 2019.

2. OP-Handbuch zum Schwellkörperimplantat AMS 700 mit MS Pump. American Medical Systems, Inc. 2018.

Alle erwähnten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

ACHTUNG: Aufgrund gesetzlicher Vorschriften dürfen diese Produkte ausschließlich an einen Arzt oder auf dessen Anordnung verkauft werden. Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise und Gebrauchsanweisungen sind der Packungsbeilage und Etikettierung des jeweiligen Produkts zu entnehmen. Die abgebildeten Produkte werden ausschließlich zu INFORMATIONSZWECKEN gezeigt und sind in bestimmten Ländern möglicherweise nicht zugelassen oder dürfen nicht verkauft werden. Dieses Material ist nicht zur Verwendung in Frankreich vorgesehen. Produkt nur im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) erhältlich.

Informationen über die Verfügbarkeit erhalten Sie von Ihrem zuständigen Vertriebsmitarbeiter oder dem Kundenservice.

Alle Abbildungen sind das Eigentum von Boston Scientific. Alle Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

MH-1085801-AA. Hergestellt von Gosling.

Boston
Scientific
Advancing science for life™

www.bostonscientific.eu

2022 Copyright ©
Boston Scientific Corporation
oder deren Tochterunternehmen.
Alle Rechte vorbehalten.
DINURO2483GA

Ihre beste Ressource für weitere Informationen ist Ihr Arzt. Ihr Arzt ist mit Ihrer medizinischen Situation vertraut und kann gemeinsam mit Ihnen sicherstellen, dass Sie die bestmöglichen Ergebnisse aus dem Gebrauch des Schwellkörperimplantats erzielen.

Sie können auch unsere Website besuchen unter www.ED-Behandlungen.de



Das auffüllbare Schwellkörperimplantat der Serie AMS 700™

Das AMS 700 auffüllbare Schwellkörperimplantat besteht aus drei Komponenten, die durch Schläuche verbunden sind (Abbildung 1): ein Reservoir, zwei Zylinder und eine Pumpe zum Füllen/Entleeren.

Das Reservoir wird im unteren Bauch implantiert und enthält die Flüssigkeit, bis der Patient die Zylinder füllt.

Die beiden Zylinder werden nebeneinander in den Schaft des Penis eingeführt.

Die Pumpe, die über einen Pumpballon und einen Entleerungsknopf verfügt, wird im Hodensack implantiert. Die Pumpe wird zum Auffüllen und Entleeren der Zylinder verwendet, indem Flüssigkeit vom Reservoir in die Zylinder geleitet wird.

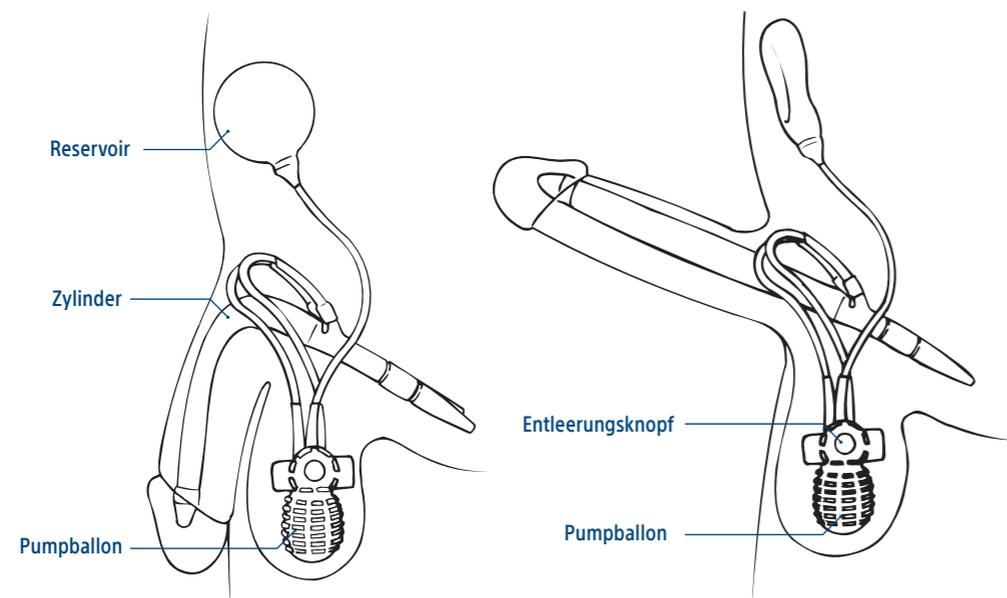


Abbildung 1

Auffüllen des Implantats¹

Wenn Sie den Pumpballon drücken und freigeben, bewegt sich die Flüssigkeit vom Reservoir durch die Pumpe in die Zylinder. Wenn sich die Zylinder mit Flüssigkeit füllen, wird der Penis erigiert.

1. ertasten Sie den Pumpballon im Hodensack.
2. Greifen Sie das Schlauchsystem über dem Entleerungsblock mit einer Hand und halten Sie die Pumpe fest (Abbildung 2). Wenn Sie den einhändigen Ansatz wählen, halten Sie den Pumpballon mit der dominanten Hand mit Daumen und Zeigefinger (und Mittelfinger) fest, um den Pumpballon zu greifen.
3. ertasten Sie mit Daumen und Zeigefinger der anderen Hand den runden Pumpballon.
4. Drücken Sie den Pumpballon zunächst schnell und kräftig zusammen und geben Sie den Ball dann wieder frei, um die Pumpe zu aktivieren (Abbildung 3). Wenn sich das Ventil in der Pumpe in die aktivierte Position bewegt, spüren oder hören Sie einen Ruck.
5. Die nächsten Druckaktionen an dem Pumpballon können langsamer erfolgen. Durch Freigeben kann sich der Pumpballon wieder mit Flüssigkeit füllen. Wiederholen Sie den Vorgang so lange, bis sich die Zylinder mit Flüssigkeit füllen und der Penis steif ist. Für eine vollständige Erektion muss der Pumpballon möglicherweise mehrmals gedrückt und wieder freigegeben werden. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über die optimale Anzahl von Betätigungen.

Drücken Sie NICHT auf den Entleerungsknopf, während Sie den Pumpballon zusammendrücken.

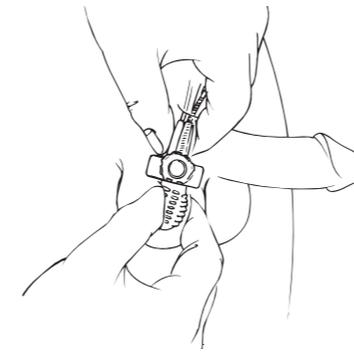


Abbildung 2

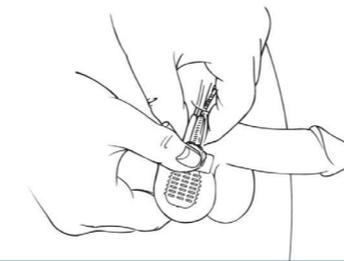


Abbildung 3

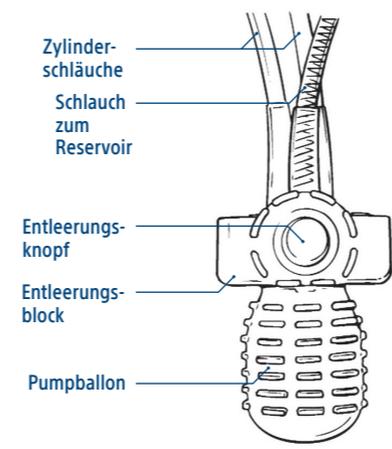


Abbildung 4

Entleeren des Implantats¹

Wenn Sie den Entleerungsknopf ungefähr 4 Sekunden lang drücken, beginnt der Rückfluss der Flüssigkeit aus den Zylindern in das Reservoir. Der Penis wird weich (erschläfft).

1. ertasten Sie die Pumpe im Hodensack.
2. Greifen Sie das Schlauchsystem über dem Entleerungsblock (Abbildung 4) mit einer Hand und halten Sie die Pumpe fest (Abbildung 3).
3. ertasten Sie mit der anderen Hand den erhöhten Entleerungsknopf auf dem Entleerungsblock (Abbildung 4).
4. Um den Entleerungsknopf effektiv zusammenzudrücken, müssen sich Daumen und Zeigefinger auf den gegenüberliegenden Seiten des Entleerungsblocks befinden.
5. Den Entleerungsknopf ungefähr 4 Sekunden lang drücken und dann wieder freigeben. Die Zylinder entleeren sich weiter und der Penis wird schlaff.
6. Nachdem sich die Zylinder entleert haben, können Sie für eine nahezu vollständige Erschlaffung den Penis zusätzlich drücken.

Drücken Sie NICHT auf den Entleerungsknopf, während Sie den Pumpballon zusammendrücken.

Fehlerbehebung am Pumpballon²

Wenn der Pumpballon eingedrückt oder zusammengefallen ist oder es schwierig ist, die Zylinder aufzudehnen oder nicht aufzudehnen,

1. Den Entleerungsknopf drücken, um den Pumpballon neu zu füllen.
2. Aktivieren Sie dann die Pumpe durch STARKES, SCHNELLES Zusammendrücken des Pumpballons neu.
3. Füllen Sie das Implantat wie Sie es normalerweise tun auf.

Wenn das Problem damit nicht behoben ist, folgendermaßen vorgehen:

1. Drücken Sie die Seiten des Entleerungsblocks zusammen, um den Pumpballon neu zu füllen.
2. Drücken Sie den Entleerungsknopf 2 bis 4 Sekunden lang, um das Implantat zurückzusetzen.
3. Aktivieren Sie die Pumpe durch STARKES, SCHNELLES Zusammendrücken des Pumpballons neu.
4. Füllen Sie das Implantat wie Sie es normalerweise tun auf.

Wenn sich das Implantat nicht aufpumpen lässt und vielleicht ein Schlauch geknickt ist, wenden Sie das Zieh-Streck-Verfahren an. Den Penis 2- bis 3-mal nach außen, oben, unten und zur Seite ziehen und strecken, um mögliche Knicke zu entfernen. Dies kann das Füllen der Zylinder bewirken.

Drücken Sie NICHT auf den Entleerungsknopf, während Sie den Pumpballon zusammendrücken.

Drücken Sie NICHT die Enden des Entleerungsblocks zusammen, während gleichzeitig der Pumpballon zusammengedrückt wird.